

ANEXO No 1
SNS 3000-PMH

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
CAMAS DE TRASPORTE Y RECUPERACION	422	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes electrónicos, Validación y puesta en marcha.
CAMAS DE TRASPORTE Y RECUPERACION	423	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes electrónicos, Validación y puesta en marcha.
CAMILLA HOSPITALARIA DE 2 PLANOS	424	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes lubricacion.
CAMILLA HOSPITALARIA DE 2 PLANOS	427	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes lubricacion.
CAMILLA HOSPITALARIA DE 2 PLANOS	428	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes lubricacion.
CAMILLA HOSPITALARIA DE 2 PLANOS	429	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes lubricacion.
CAMILLA HOSPITALARIA DE 2 PLANOS	430	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes lubricacion.
CAMILLA HOSPITALARIA DE 2 PLANOS	431	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes lubricacion.
CAMILLA HOSPITALARIA DE 2 PLANOS	432	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes lubricacion.
CAMILLA HOSPITALARIA DE 2 PLANOS	433	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes lubricacion.
FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	434	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza general revision de campana

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	435	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza general revision de campana
TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO	436	ASLAMIENTO COVI-19	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificacion de presion - Revision de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazaletes) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
D.E.A.	416	AMBULANCIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la bateria -Revisión del sensor de oximetria y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
D.E.A.	417	AMBULANCIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la bateria -Revisión del sensor de oximetria y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
D.E.A.	418	AMBULANCIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la bateria -Revisión del sensor de oximetria y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
D.E.A.	419	AMBULANCIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la bateria -Revisión del sensor de oximetria y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
BALANZA DE PIE CON BRAZO Y TALLIMETRO	1239	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
BALANZA PESA BEBES 65 KL. C.C.Y D	384	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

BALANZA PESA BEBES X 65 KL	1217	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
-------------------------------	------	---------------------------	---------------	--------------	--	---

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
BASCULA ELECTRONICA DE PISO ALTA CAPACIDAD SECA 813	1419	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
BASCULA ELECTRONICA DE PISO ALTA CAPACIDAD SECA 813	1436	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
BASCULA ELECTRONICA DE PISO SOBRE PESO SECA ALEMAN 813	0966	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
BASCULA ELECTRONICA DE PISO SOBRE PESO SECA ALEMAN 813	0967	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión de escape de aire y drenaje - Verificación y medición de presión de aire (PSI) de llegada a la unidad y de salida regulada - Limpieza y drenaje de filtros - Verificación. Limpieza y ajuste de válvulas reguladoras de aire y agua - Revisión y verificación de las funciones del sillón - Revisión y ajuste de contactos electrónicos y de la lámpara auxiliar - Lubricación y ajuste de piezas de mano. Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
BASCULA ELECTRONICA DE PISO SOBRE-PESO SECA ALEMAN 813	0965	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
BASCULA ELETRONICA DE PISO SOBREPESO SSECA ALEMAN 813	0964	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
BASCULA PEDIATRICA GRADO MEDICO SECA 354	1323	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
BASCULA PEDIATRICA GRADO MEDICO SECA 354	1324	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

DETECTOR FETAL DOOPLER C/PANTALLA	154	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general los componentes mecánicos eléctricos, revisión de funcionamiento del R.P.M, ajuste del mismo , revisión de las escobillas, lubricación al motor, calibración al velocímetro, Validacion y puesta en marcha
DOOPLER FETAL CON PANTALLA-C.P.N.	386	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general los componentes mecánicos eléctricos, revisión de funcionamiento del R.P.M, ajuste del mismo , revisión de las escobillas, lubricación al motor, calibración al velocímetro, Validacion y puesta en marcha

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED W.A WELCH ALLYN DE PARED REF.77510	1417	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de contactos eléctricos - Limpieza del reostato regulador de intensidad de luz - Verificación de baterías (pilas) alcalinas - Limpieza de lentes y oculares - Verificar el estado de los bombillos - Limpieza general - revisión de las cabezas oftalmoscopio y otoscopio - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS W.ALLYN WELCH ALLYN PORTATIL	1318	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de contactos eléctricos - Limpieza del reostato regulador de intensidad de luz - Verificación de baterías (pilas) alcalinas - Limpieza de lentes y oculares - Verificar el estado de los bombillos - Limpieza general - revisión de las cabezas oftalmoscopio y otoscopio - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS WELCH ALLYN WELCH ALLYN PORTATIL	1329	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de contactos eléctricos - Limpieza del reostato regulador de intensidad de luz - Verificación de baterías (pilas) alcalinas - Limpieza de lentes y oculares - Verificar el estado de los bombillos - Limpieza general - revisión de las cabezas oftalmoscopio y otoscopio - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED WELCH ALLYN	0981	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de contactos eléctricos - Limpieza del reostato regulador de intensidad de luz - Verificación de baterías (pilas) alcalinas - Limpieza de lentes y oculares - Verificar el estado de los bombillos - Limpieza general - revisión de las cabezas oftalmoscopio y otoscopio - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED WELCH ALLYN	0982	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de contactos eléctricos - Limpieza del reostato regulador de intensidad de luz - Verificación de baterías (pilas) alcalinas - Limpieza de lentes y oculares - Verificar el estado de los bombillos - Limpieza general - revisión de las cabezas oftalmoscopio y otoscopio - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED WELCH ALLYN	0983	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de contactos eléctricos - Limpieza del reostato regulador de intensidad de luz - Verificación de baterías (pilas) alcalinas - Limpieza de lentes y oculares - Verificar el estado de los bombillos - Limpieza general - revisión de las cabezas oftalmoscopio y otoscopio - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED WELCH ALLYN	0984	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de contactos eléctricos - Limpieza del reostato regulador de intensidad de luz - Verificación de baterías (pilas) alcalinas - Limpieza de lentes y oculares - Verificar el estado de los bombillos - Limpieza general - revisión de las cabezas oftalmoscopio y otoscopio - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN	175	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
FONENDOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN ADULTO	0985	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
FONENDOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN ADULTO	0986	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
FONENDOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN ADULTO	0987	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
FONENDOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN ADULTO	0988	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
FONENDOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN ADULTO	0989	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
FONENDOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN WELCH ALLYN REF.5079-135	1422	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza y lubricación de aspas para velocidad - Lubricación de rodamientos del rotor - Limpieza del acople para el contra ángulo - Limpieza y ajuste del sentido de giro (derecha/izquierda) - Limpieza general empaquetaduras, rodamientos y acoples - Lubricación, revisión de los piñones del contra ángulo - Lubricación general general - Verificación de funcionamiento

FONENDOSCOPIO ADULTOS ALPK2 ALPK2 ADULTO	1341	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
FONENDOSCOPIO ADULTOS WELCH ALLYN WELCH ALLYN REF.5079-135	1421	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
FONENDOSCOPIO COORDINACION PYP WELCH ALLYN	387	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
FONENDOSCOPIO - COORDINACION PYP WELCH ALLYN	451	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO WELCH ALLYN PEDIATRICO	991	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO WELCH ALLYN PEDIATRICO	0992	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO W.A WELCH ALLYN	1319	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
INFANTOMETRO GRADO MEDICO SECA 417	1325	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado físico - Lubricación, revisión de piezas mecánicas - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.
INFANTOMETRO GRADO MEDICO SECA 417	1326	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado físico - Lubricación, revisión de piezas mecánicas - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.

INFANTOMETRO GRADO MEDICO SECA 417	1327	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado físico - Lubricación, revisión de piezas mecánicas - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.
INFANTOMETRO GRADO MEDICO SECA 417	1320	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado físico - Lubricación, revisión de piezas mecánicas - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.
LAMPARA AUXILIAR PARA EXAMEN WELCH ALLYN GS/300/44400	0994	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del sistema eléctrico - Verificación de voltaje de entrada y de alimentación de iluminación -ajuste de sokes y conectores eléctricos - Limpieza de filtros y enfoque - Limpieza y lubricación de las piezas mecánicas de ecualización en enfoque - limpieza general - verificacion de los parametros de funcionamiento.
LAMPARA AUXILIAR PARA EXAMEN WELCH ALLYN GS 300/44400	0995	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del sistema eléctrico - Verificación de voltaje de entrada y de alimentación de iluminación -ajuste de sokes y conectores eléctricos - Limpieza de filtros y enfoque - Limpieza y lubricación de las piezas mecánicas de ecualización en enfoque - limpieza general - verificacion de los parametros de funcionamiento.

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
LAMPARA AUXILIAR PARA EXAMEN WELCH ALLYN GX 300/44400	0996	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del sistema eléctrico - Verificación de voltaje de entrada y de alimentación de iluminación -ajuste de sokes y conectores eléctricos - Limpieza de filtros y enfoque - Limpieza y lubricación de las piezas mecánicas de ecualización en enfoque - limpieza general - verificacion de los parametros de funcionamiento.
LAMPARA AUXILIAR PARA EXAMEN WELCH ALLYN GS 300/44400	0997	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
LAMPARA PARA FOTOCURADO	1137	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de parametros de funcionamiento - Verificación del estado del motor - Verificación del sistema eléctrico
LAMPARA PARA FOTOCURADO	1136	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del sistema eléctrico - Verificación de voltaje de entrada y de alimentación de iluminación -ajuste de sokes y conectores eléctricos - Limpieza de filtros y enfoque - Limpieza y lubricación de las piezas mecánicas de ecualización en enfoque - limpieza general - verificacion de los parametros de funcionamiento.
LARINGOSCOPIO ADULTO MACINTOSH	866	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de conectores eléctricos - Verificación de las baterías (pilas) alcalinas - Revisión de bombillos e iluminación

LARINGOSCOPIO ADULTO	867	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de conectores eléctricos - Verificación de las baterías (pilas) alcalinas - Revisión de bombillos e iluminación
MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC-8	1376	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
PESA BEBES X 20 KILOS DETECTO DETECTO	339	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.
PESA BEBES X 20 KILOS DETECTO DETECTO	453	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
PESA DIGITAL DE PISO MARCA SECA SECA ROBUSTA 813	1342	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de contactos eléctricos - Limpieza del reostato regulador de intensidad de luz - Verificación de baterías (pilas) alcalinas - Limpieza de lentes y oculares - Verificar el estado de los bombillos - Limpieza general - revisión de las cabezas oftalmoscopia y otoscopia - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
SUCCIONADOR PORTATIL THOMAS	847	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, lubricación y ajuste del motor - Lubricación de rodamientos - Revisión de empaquetaduras de compresión de succión del diafragma y de los flapper - Revisión de la válvula de alivio - Verificación del estado de la manguera, empaque del vaso, filtro hidrofóbico y de presión de succión - Limpieza general - Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
TALLIMETRO GRADO MEDICO SECA 217	1328	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.

TALLIMETRO GRADO MEDICO SECA 217	1330	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de parametros de funcionamiento - Verificación de voltajes - Verificación de oxcladores - Verificación del estado de los electrodos y cables - Limpieza general
TALLIMETRO GRADO MEDICO SECA 217	1322	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de parametros de funcionamiento - Verificación del sistema electrónico - Verificación del cristal - Verificación de voltajes - Limpieza general
TALLIMETRO GRADO MEDICO SECA 217	1321	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.
TENSIOMETRO DE ANEROIDES	1568	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificacion de presion - Revision de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazaletes) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
TENSIOMETRO PARA ADULTOS PODABLE WELCH ALLYN ADULTO	1289	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificacion de presion - Revision de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazaletes) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
TENSIOMETRO PARA ADULTOS RODABLE WELCH ALLYN ADULTO	1290	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificacion de presion - Revision de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazaletes) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
TENSIOMETRO PARA ADULTOS RODABLE WELCH ALLYN ADULTO	1291	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificacion de presion - Revision de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazaletes) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
TENSIOMETRO PARA ADULTOS RODABLE WELCH ALLYN ADULTO	1292	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificacion de presion - Revision de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazaletes) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
TENSIOMETRO PARA ADULTOS RODABLE WELCH ALLYN ADULTO	1299	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificacion de presion - Revision de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazaletes) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
TENSIOMETRO RODABLE WELCH ALLYN WELCH ALLYN HEAVY DUTY T	1423	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificacion de presion - Revision de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazaletes) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .

TENSIOMETRO RODABLE WELCH ALLYN WELCH ALLYN HEAVY DUTY	1424	CONSULTA EXTERNA Y PYP	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificacion de presion - Revision de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazalete) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
ECOGRAFO GENERAL	420	ECOGRAFIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado de la batería (alkalina) -Revisión y limpieza del transductor incluyendo su conector interno - Limpieza del control de ganancia - Verificación del estado del cable - Verificación del transductor de ultrasonido - Limpieza general (equipo y transductor) - verificacion de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
AUTOCLAVE ELECTRONICO MIDMAR RITTER AMERICANO	0963	ESTERILIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión de escape de aire y drenaje - Verificación y medición de presión de aire (PSI) de llegada a la unidad y de salida regulada - Limpieza y drenaje de filtros - Verificación. Limpieza y ajuste de válvulas reguladoras de aire y agua - Revisión y verificación de las funciones del mando de control Revisión y ajuste de contactos electrónicos y de la camar interna -limpieza y verificacion de resistencias. Lubricación y ajuste de piezas de mano. Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
AUTOCLAVE TIPO OLLA X 25 LITROS	787	ESTERILIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión de escape de aire y drenaje - Verificación y medición de presión de aire (PSI) de llegada a la unidad y de salida regulada - Limpieza y drenaje de filtros - Verificación. Limpieza y ajuste de válvulas reguladoras de aire y agua - Revisión y verificación de las funciones del mando de control Revisión y ajuste de contactos electrónicos y de la camar interna -limpieza y verificacion de resistencias. Lubricación y ajuste de piezas de mano. Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
TERMOHIGROMETRO	N.R	FARMACIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	validacion de sensores estado fisico del equipo baterias pruebas de funcionamiento verificacion de lecturas de temperaturas y humedad
TERMOHIGROMETRO	N.R	FARMACIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	validacion de sensores estado fisico del equipo baterias pruebas de funcionamiento verificacion de lecturas de temperaturas y humedad
TERMOHIGROMETRO	N.R	FARMACIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	validacion de sensores estado fisico del equipo baterias pruebas de funcionamiento verificacion de lecturas de temperaturas y humedad

TERMOMETRO GENERICO	N.R	FARMACIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	validacion de sensores estado fisico del equipo baterias pruebas de funcionamiento verificacion de lecturas de temperaturas y humedad
NEVERA REFRIGERADOR		FARMACIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes , electrónicos. Validación y puesta en marcha.
BOMBA DE INFUSION MAR:MEDCAPTAIN MEDCATAIN MP-60	1430	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificacion de presion - Revision de paso de infusion verificacion de estado fisico - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
CAMA HOSPITALARIA ADULTOS CON 03 COMPART	554	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA HOSPITALARIA ADULTOS CON 03 COMPART	553	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA HOSPITALARIA ADULTOS CON 03 COMPART	557	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA HOSPITALARIA ADULTOS CON 03 COMPART	558	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
CAMA HOSPITALARIA ADULTOS CON 03 COMPART	556	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA DOMETAL ELECTRICA	0970	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA DOMETAL ELECTRICA	0971	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA DOMETAL ELECTRICA	0972	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA DOMETAL ELECTRICA	0973	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA MAR:DOMETAL DOMETAL	1426	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA MAR:DOMETAL DOMETAL	1427	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA METALICA DANESA	130	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
CAMA METALICA DANESA	131	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

CAMA METALICA DANESA	132	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA PEDIATRICA CON BARANDAS	460	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA PEDIATRICA CON BARANDAS	552	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA PEDIATRICA CON BARANDAS	555	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA-CUNA PEDIATRICA DOMETAL	0969	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA-CUNA PEDIATRICA ELECTRICA MAR:DOMETAL DOMETAL	1428	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMA-CUNA PEDIATRICA ELECTRICA MAR:DOMETAL DOMETAL	1429	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
-------------	------------	-----------	---------------	--------------	---------------	---------------

CAMILLA DE PROCEDIMIENTOS	562	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecanicas y electronicas verificacion de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
DESFIBRILADOR	564	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación señal ECG - Verificación de carga y descarga joules - limpieza de electrodos de descarga y electrodos ECG - Revisión del voltaje de alimentación A.C. y sistema de tierra - Limpieza general del equipo - verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
DOOPLER FETAL	573	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado de la batería (alkalina) -Revisión y limpieza del transductor incluyendo su conector interno - Limpieza del control de ganancia - Verificación del estado del cable - Verificación del transductor de ultrasonido - Limpieza general (equipo y transductor) - verificacion de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
ECOGRAFO TOSHIBA MOD FAMIO 5	571	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado de la batería (alkalina) -Revisión y limpieza del transductor incluyendo su conector interno - Limpieza del control de ganancia - Verificación del estado del cable - Verificación del transductor de ultrasonido - Limpieza general (equipo y transductor) - verificacion de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
INCUBADORA ABIERTA CON LAMPARA DE LUZ	575	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de contactos eléctricos - Limpieza del reostato regulador de intensidad de luz - Verificación de baterías (pilas) alcalinas - Limpieza de lentes y oculares - Verificar el estado de los bombillos - Limpieza general - revisión de las cabezas oftalmoscopio y otoscopio - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.
LAMPARA CIELITICA DE 4 FOCO CC24-104	794	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de contactos eléctricos - Limpieza del reostato regulador de intensidad de luz - Verificación de baterías (pilas) alcalinas - Limpieza de lentes y oculares - Verificar el estado de los bombillos - Limpieza general - revisión de las cabezas oftalmoscopio y otoscopio - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.
LARINGOSCOPIO WELLCH ALLYN	127	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de conectores eléctricos - Verificación de las baterías (pilas) alcalinas - Revisión de bombillos e iluminación

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
LARINGOSCOPIO WELLCH ALLYN	126	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de conectores eléctricos - Verificación de las baterías (pilas) alcalinas - Revisión de bombillos e iluminación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	579	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
SUCCIONADOR THOMAS RF 1630	1218	HOSPITALIZACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, lubricación y ajuste del motor - Lubricación de rodamientos - Revisión de empaquetaduras de compresión de succión del diafragma y de los flapper - Revisión de la válvula de alivio - Verificación del estado de la manguera, empaque del vaso, filtro hidrofóbico y de presión de succión - Limpieza general - Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
AGITADOR DE MANZZINI	413	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes mecánicos, eléctricos, engrase a los brazos de la porta bandeja, lubricación al motor , verificación de funcionamiento del sistema eléctrico. Validación y puesta en marcha.
AGITADOR VASCULARIZANTE HEMOGRAMA REF:20	907	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes mecánicos, eléctricos, engrase a los brazos de la porta bandeja, lubricación al motor , verificación de funcionamiento del sistema eléctrico. Validación y puesta en marcha.
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DIATRON ABACUS380	1317	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes mecánicos, eléctricos, engrase a los brazos de la porta bandeja, lubricación al motor , verificación de funcionamiento del sistema eléctrico. Validación y puesta en marcha.
BAÑO SEROLOGICO	415	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del cableado, clavija, swiche y conectores - Verificación del estado del tubo de iluminación, starte y balstra (bobina de inducción de iluminación) - Limpieza general.
CENTRIFUGA ANALITICA P/6 TUBOS CLAY ADAM	894	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general los componentes mecánicos eléctricos, revisión de funcionamiento del R.P.M, ajuste del mismo , revisión de las escobillas, lubricación al motor, calibración al velocímetro, Validación y puesta en marcha
CENTRIFUGA DIGITAL DE 24 TUBOS X 24 TUBOS	05	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general los componentes mecánicos eléctricos, revisión de funcionamiento del R.P.M, ajuste del mismo , revisión de las escobillas, lubricación al motor, calibración al velocímetro, Validación y puesta en marcha

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA
PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
CENTRIFUGA DIGITAL MARCA:HERMLE-ALEMAN HERMLE-ALEMAN Z-306	1432	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general los componentes mecánicos eléctricos, revisión de funcionamiento del R.P.M, ajuste del mismo , revisión de las escobillas, lubricación al motor, calibración al velocímetro, Validacion y puesta en marcha
CONTADOR ELECTRONICO CELULAR KRAM	898	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
EQUIPO DE QUIMICA CLINICA	905	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Diagnostico del equipo, calibracion de las ganancias ópticas, mantenimiento a: tarjetas de alimentación del equipo, a la cpu, al sistema óptico como rueda de filtros, ajuste de la velocidad del motor. Mantenimiento preventivo a todas las tarjetas electrónicas del equipo. Limpieza de la impresora. Validación y puesta en marcha.
EQUIPO DE QUIMICA CLINICA AUTOMATIZADO MOD-A15 BIOSYSTEMS A15 SEIRE:5966	1437	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Diagnostico del equipo, calibracion de las ganancias ópticas, mantenimiento a: tarjetas de alimentación del equipo, a la cpu, al sistema óptico como rueda de filtros, ajuste de la velocidad del motor. Mantenimiento preventivo a todas las tarjetas electrónicas del equipo. Limpieza de la impresora. Validación y puesta en marcha.
HORNO ESTERILIZADOR	419	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza del termostato y resistencia - Revisión de la válvula de seguridad de sobre presión de la válvula de alivio y manometro de presión - Revisión de contactos eléctricos - limpieza general - Verificacion de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las esrecificaciones dadas por el fabricante.
MICROSCOPIO BINOCULAR OLYMPUS OLYMPUS	475	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes mecánicos, eléctricos, lubricacion al porta laminas, verificación de funcionamiento del sistema eléctrico. Curacion del sistema optico. Validación y puesta en marcha.
PIPETA AUTOMATICA MARCA:HUMAN HUMAN AUTOMATICA	1433	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general de la empaquetadura, revisión de la piñonearía, calibración, validación y puesta en marcha.
PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE HIUMAN ALEMANA MOD 05 20A10- 1000UL	0932	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general de la empaquetadura, revisión de la piñonearía, calibración, validación y puesta en marcha.
PIPETA AUTOMATICA MARCA: BRAND	N.R	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general de la empaquetadura, revisión de la piñonearía, calibración, validación y puesta en marcha.

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022
NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
DIRECCION: PALERMO - HUILA
PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
PIPETA AUTOMATICA MARCA: BRAND	N.R	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general de la empaquetadura, revisión de la piñonera, calibración, validación y puesta en marcha.
PIPETA AUTOMATICA MARCA:BOECO	N.R	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general de la empaquetadura, revisión de la piñonera, calibración, validación y puesta en marcha.
PIPETA AUTOMATICA MARCA:BOECO	N.R	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general de la empaquetadura, revisión de la piñonera, calibración, validación y puesta en marcha.
MICROCENTRIFUGA INDULAB	N.R	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general los componentes mecánicos eléctricos, revisión de funcionamiento del R.P.M, ajuste del mismo , revisión de las escobillas, lubricación al motor, calibración al velocímetro, Validación y puesta en marcha
NEVERA REFRIGERADO	N.R	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes , electrónicos, Validación y puesta en marcha.
TERMOMETRO GENERICO	N.R	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	validación de sensores estado físico del equipo baterías pruebas de funcionamiento verificación de lecturas de temperaturas y humedad
NEVERA	438	LABORATORIO CLINICO	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes electrónicos, Validación y puesta en marcha.
EQUIPO DE RX ODONTOLOGICO	421	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	1150	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes , electrónicos, Validación y puesta en marcha.
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	1149	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes , electrónicos, Validación y puesta en marcha.

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
AMALGAMADOR ODONTOLOGICO PROMIX 115V	1313	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAVITRON BOBCAT COMPLETO BOBCAT	1725	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del cable de alimentación, contactos y conectores eléctricos - Verificación del estado del bombillo - Limpieza general - Verificación de funcionamiento
CAVITRON MARCA DENTSPLAY MOD:BOBCAT PRO DENTSPLAY BOBCAT PUNTA INSERTO25K	1425	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado de la batería (alkalina) -Revisión y limpieza del transductor incluyendo su conector interno - Limpieza del control de ganancia - Verificación del estado del cable - Verificación del transductor de ultrasonido - Limpieza general (equipo y transductor) - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
LAMPARA DE FOTOCURADO	1740	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
LAMPARA DE FOTOCURADO	1738	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, lubricación y ajuste del motor - Lubricación de rodamientos - Revisión de empaquetaduras de compresión de succión del diafragma y de los flapper - Revisión de la válvula de alivio - Verificación del estado de la manguera, empaque del vaso, filtro hidrofóbico y de presión de succión - Limpieza general - Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
LAMPARA DE FOTOCURADO SUNLITE 12	862	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de olivas y sus conectores - Limpieza de la campana receptora - Revisión de diafragma y anillo - Verificación del estado de la manguera (Y) - Verificación de funcionamiento con recepción de señal.
LAMPARA FOTOCURADO SUNLITE 1275	824	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de presión - Revisión de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazalete) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
LAMPARA PARA FOTOCURADO	1739	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de presión - Revisión de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazalete) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
SUCCIONADOR PORTATIL THOMAS REF-1130-GL	1581	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, lubricación y ajuste del motor - Lubricación de rodamientos - Revisión de empaquetaduras de compresión de succión del diafragma y de los flapper - Revisión de la válvula de alivio - Verificación del estado de la mangauera, empaque del vaso, filtro hidrofobo y de presión de succión - Limpieza general - Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	1754	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión de escape de aire y drenaje - Verificación y medición de presión de aire (PSI) de llegada a la unidad y de salida regulada - Limpieza y drenaje de filtros - Verificación. Limpieza y ajuste de válvulas reguladoras de aire y agua - Revisión y verificación de las funciones del sillón - Revisión y ajuste de contactos electrónicos y de la lámpara auxiliar - Lubricación y ajuste de piezas de mano. Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA CROMADENT ELECTRICA	14	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión de escape de aire y drenaje - Verificación y medición de presión de aire (PSI) de llegada a la unidad y de salida regulada - Limpieza y drenaje de filtros - Verificación. Limpieza y ajuste de válvulas reguladoras de aire y agua - Revisión y verificación de las funciones del sillón - Revisión y ajuste de contactos electrónicos y de la lámpara auxiliar - Lubricación y ajuste de piezas de mano. Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA X 3 SERVICIOS AMERICAN DENTAL ELECTRICA DE 3 SERV.	1297	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión de escape de aire y drenaje - Verificación y medición de presión de aire (PSI) de llegada a la unidad y de salida regulada - Limpieza y drenaje de filtros - Verificación. Limpieza y ajuste de válvulas reguladoras de aire y agua - Revisión y verificación de las funciones del sillón - Revisión y ajuste de contactos electrónicos y de la lámpara auxiliar - Lubricación y ajuste de piezas de mano. Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA X 3 SERVICIOS AMERICAN DENTAL ELECTRICA DE 3 SERV.	1298	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión de escape de aire y drenaje - Verificación y medición de presión de aire (PSI) de llegada a la unidad y de salida regulada - Limpieza y drenaje de filtros - Verificación. Limpieza y ajuste de válvulas reguladoras de aire y agua - Revisión y verificación de las funciones del sillón - Revisión y ajuste de contactos electrónicos y de la lámpara auxiliar - Lubricación y ajuste de piezas de mano. Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

ANEXO No 1
SNS 3000-PMH

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	832	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión de escape de aire y drenaje - Verificación y medición de presión de aire (PSI) de llegada a la unidad y de salida regulada - Limpieza y drenaje de filtros - Verificación. Limpieza y ajuste de válvulas reguladoras de aire y agua - Revisión y verificación de las funciones del sillón - Revisión y ajuste de contactos electrónicos y de la lámpara auxiliar - Lubricación y ajuste de piezas de mano. Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
UNIDAD ODOTOLOGICA FIJA	79	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión de escape de aire y drenaje - Verificación y medición de presión de aire (PSI) de llegada a la unidad y de salida regulada - Limpieza y drenaje de filtros - Verificación. Limpieza y ajuste de válvulas reguladoras de aire y agua - Revisión y verificación de las funciones del sillón - Revisión y ajuste de contactos electrónicos y de la lámpara auxiliar - Lubricación y ajuste de piezas de mano. Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
COMPRESOR ODONTOLOGICO SCHULZ MSV 12	126	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de voltaje y presión de aire (PSI) - Verificación del cheque y válvula de alivio - Limpieza del filtro de aire - Verificación de los parámetros de funcionamiento del presostato - Revisión de fuga de aire - Limpieza y ajuste general - Revisión de rodamientos y ajuste general del motor - Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
MICROMOTOR NSK EX203C	N.R	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de la turbina - Revisión del estado del shuck - Lubricación de rodamientos - Limpieza de conductos de aire - Verificación de funcionamiento.
TERMOMETRO GENERICO	N.R	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	validacion de sensores estado fisico del equipo baterias pruebas de funcionamiento verificacion de lecturas de temperaturas y humedad
PIEZA DE ALTA VELOCIDAD NSK	N.R	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de la turbina - Revisión del estado del shuck - Lubricación de rodamientos - Limpieza de conductos de aire - Verificación de funcionamiento.
PIEZA DE ALTA VELOCIDAD NSK	N.R	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de la turbina - Revisión del estado del shuck - Lubricación de rodamientos - Limpieza de conductos de aire - Verificación de funcionamiento.

MICROMOTOR NSK EX203C	N.R	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de la turbina - Revisión del estado del shuck - Lubricación de rodamientos - Limpieza de conductos de aire - Verificación de funcionamiento.
-----------------------	-----	-------------	---------------	--------------	--	---

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
MICROMOTOR NSK EX203C	N.R	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de la turbina - Revisión del estado del shuck - Lubricación de rodamientos - Limpieza de conductos de aire - Verificación de funcionamiento.
MICROMOTOR NSK EX203C	N.R	ODONTOLOGIA	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza de la turbina - Revisión del estado del shuck - Lubricación de rodamientos - Limpieza de conductos de aire - Verificación de funcionamiento.
BANDA CAMINADORA TRATODORA NEUROM	1403	REHABILITACION Y TERAPIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
ELECTROESTIMULADOR BIODERM TENSUNIRUSS	0980	REHABILITACION Y TERAPIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado de la batería (alkalina) -Revisión y limpieza del transductor incluyendo su conector interno - Limpieza del control de ganancia - Verificación del estado del cable - Verificación del transductor de ultrasonido - Limpieza general (equipo y transductor) - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
ELECTROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR NEUROM	1404	REHABILITACION Y TERAPIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado de la batería (alkalina) -Revisión y limpieza del transductor incluyendo su conector interno - Limpieza del control de ganancia - Verificación del estado del cable - Verificación del transductor de ultrasonido - Limpieza general (equipo y transductor) - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
MASAJEADOR CON INFRAROJO BROTHER 35W	1283	REHABILITACION Y TERAPIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de conectores eléctricos - Verificación de las baterías (pilas) alcalinas - Revisión de bombillos e iluminación, verificación de conos masajeadores.
SPINNIG (CICLA ESTATICA) SPEED 13	1405	REHABILITACION Y TERAPIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, lubricación de piezas mecánicas - Verificación de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.

TENS BIO TENS REEDUCADOR	1234	REHABILITACION Y TERAPIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado de la batería (alkalina) -Revisión y limpieza del transductor incluyendo su conector interno - Limpieza del control de ganancia - Verificación del estado del cable - Verificación del transductor de ultrasonido - Limpieza general (equipo y transductor) - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
ULTRASONIDO BIODERM ENDOSOMIC 1-3 MHZ	1296	REHABILITACION Y TERAPIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado de la batería (alkalina) -Revisión y limpieza del transductor incluyendo su conector interno - Limpieza del control de ganancia - Verificación del estado del cable - Verificación del transductor de ultrasonido - Limpieza general (equipo y transductor) - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
MASAJEADOR CON INFRAROJO SUPER LOOK		REHABILITACION Y TERAPIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de conectores eléctricos - Verificación de las baterías (pilas) alcalinas - Revisión de bombillos e iluminación, verificación de conos masajeadores.
HIDROCOLECTOR		REHABILITACION Y TERAPIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes , electrónicos, Validación y puesta en marcha.
BASCULA ELECTRONICA SECA ALEMAN 354	0968	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión tensión de resortes - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante.
CAMILLA ELECTRO-MECANICA LOS PINOS ELEC- 9720B	0974	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecánicas y electrónicas verificación de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
CAMILLA GINECOLOGICA	1597	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecánicas y electrónicas verificación de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
DOPPLER FETAL EDAN SONOTRAX PRO II	0979	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado de la batería (alkalina) -Revisión y limpieza del transductor incluyendo su conector interno - Limpieza del control de ganancia - Verificación del estado del cable - Verificación del transductor de ultrasonido - Limpieza general (equipo y transductor) - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

LARINGOSCOPIO PARA ADULTOS WELCH ALLYN FIBRA OPTICA 3 HOJAS	1000	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de conectores eléctricos - Verificación de las baterías (pilas) alcalinas - Revisión de bombillos e iluminación
LARINGOSCOPIO PEDIATRICO WELCH ALLYN FIBRA OPTICA 3 HOJAS	1550	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de conectores eléctricos - Verificación de las baterías (pilas) alcalinas - Revisión de bombillos e iluminación
MESA DE CIRUGIA CON COLCHONETA	1595	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecánicas y electrónicas verificación de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KHODEN PVM 2701	1284	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
BOMBA DE INFUSION MAR:MEDCAPTAIN MEDCAPTAIN MP-60	1431	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de presión - Revisión de paso de infusión verificación de estado físico - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
ENCUBADORA DE TRANSPORTE	1500	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del sistema eléctrico - Verificación de voltaje de entrada y de alimentación de iluminación -ajuste de sockets y conectores eléctricos - Limpieza de filtros y enfoque - Limpieza y lubricación de las piezas mecánicas de ecualización en enfoque - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento.
CAMILLA P/ATENCION EN URGENCIAS Y REANIMACION DOMETAL LINEA POLUX	0975	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, tensión de resortes partes mecánicas y electrónicas verificación de control y motores - Lubricación, revisión de piezas mecánicas y bujes - Limpieza general - Verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
DESFIBRILADOR DE PALETAS ADULTO-PEDIATRICO NIHON KHODEN TEC-5521 JAPONES	0978	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación señal ECG - Verificación de carga y descarga joules - limpieza de electrodos de descarga y electrodos ECG - Revisión del voltaje de alimentación A.C. y sistema de tierra - Limpieza general del equipo - verificación de parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES CON PANTALLA GENERAL ELECTRIC MODELO MAC 600 USA	0931	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del estado de la batería (alkalina) -Revisión y limpieza del transductor incluyendo su conector interno - Limpieza del control de ganancia - Verificación del estado del cable - Verificación del transductor de ultrasonido - Limpieza general (equipo y transductor) - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED W.A WELCH ALLYN DE PARED REF.77510	1418	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
FONENDOSCOPIO ADULTO WELCH ALLYN ADULTO	0990	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes , electrónicos, Validación y puesta en marcha.

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
LAMPARA PIELITICA P/PROCEDIMIENTOS TECNOLOGIA LED WELCH ALLYN GS/900 LED	0998	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes , electrónicos, Validación y puesta en marcha.
LARINGOSCOPIO PEDIATRICO WELCH ALLYN FIBRA OPTICA 3 HOJAS	1549	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión y limpieza de conectores eléctricos - Verificación de las baterías (pilas) alcalinas - Revisión de bombillos e iluminación
MONITOR DE SIGNOS VITALES WELCH ALLYN	904	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN PVM 2701	1285	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

MONITOR FETAL ANTEPARTO EDAN F3-DUAL	1301	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
NEBULIZADOR DE TRABAJO CONTINUO THOMAS 1130	1286	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión del sistema eléctrico - Verificación de voltaje de entrada y de alimentación de iluminación -ajuste de sockets y conectores eléctricos - Limpieza de filtros y enfoque - Limpieza y lubricación de las piezas mecánicas de ecualización en enfoque - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento.
PULSOOXIOMETRO (OXIMETRO DE PULSO) EDAN H100B*CON CARGADOR	1287	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
SUCCIONADOR QUIRURGICO THOMAS-USA 1145	1288	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, lubricación y ajuste del motor - Lubricación de rodamientos - Revisión de empaquetaduras de compresión de succión del diafragma y de los flapper - Revisión de la válvula de alivio - Verificación del estado de la manguera, empaque del vaso, filtro hidrofóbico y de presión de succión - Limpieza general - Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
TENSIOMETRO ANEROIDES DE PARED W.ALLYN WELCH ALLYN ADULTOS DE PARED	0913	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de presión - Revisión de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazalete) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
TENSIOMETRO PARA ADULTOS RODABLE WELCH ALLYN ADULTO	1293	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de presión - Revisión de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazalete) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .
UNIDAD ELECTROQUIRURGICA ELECTRO BISTURI	1706	SALAS DE PARTOS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de presión - Revisión de fugas de aire en los acoples, pera y bomba (brazalete) - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante .

NEBULIZADOR COMPRESOR THOMAS R 1125	1680	URGENCIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Revisión, lubricación y ajuste del motor - Lubricación de rodamientos - Revisión de empaquetaduras de compresión del diafragma y de los flapper - Revisión de la válvula de alivio - Verificación del estado de la manguera, empaques internos, filtro hidrofobito y de presión - Limpieza general - Verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
VENTILADOR	413	URGENCIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
DESFIBRILADOR CON CARRO DE PARO	414	URGENCIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
FONENDOSCOPIO	415	URGENCIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Limpieza general revision de campana
TERMOHIGROMETRO	N.R	URGENCIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	validacion de sensores estado fisico del equipo baterias pruebas de funcionamiento verificacion de lecturas de temperaturas y humedad

**ANEXO No 1
SNS 3000-PMH**

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO AÑO 2022

NOMBRE DE LA INSTITUCION: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

DIRECCION: PALERMO - HUILA

PLAN DE MANTENIMIENTO: EQUIPO BIOMEDICO Y EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO

DESCRIPCION	INVENTARIO	UBICACIÓN	MANTENIMIENTO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	OBSERVACIONES
MONITOR DE SIGNOS VITALES	439	URGENCIAS	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación del voltaje de alimentación y sus conectores - Ajuste y limpieza de tarjetas electrónicas Verificación del estado de la batería -Revisión del sensor de oximetría y de presión no invasiva - revisión del motor, manguera interna y manguera espiral - limpieza general - verificación de los parámetros de funcionamiento de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante
TERMOHIGROMETRO	N.R	VACUNACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	validacion de sensores estado fisico del equipo baterias pruebas de funcionamiento verificacion de lecturas de temperaturas y humedad

TERMOHIGROMETRO	N.R	VACUNACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	validacion de sensores estado fisico del equipo baterias pruebas de funcionamiento verificacion de lecturas de temperaturas y humedad
REFRIGERADOR HORIZONTAL	188	VACUNACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes , electrónicos, Validación y puesta en marcha.
REFRIGERADOR HORIZONTAL	412	VACUNACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes,electrónicos, Validación y puesta en marcha.
NEVERA DE REFRIGERACION	189	VACUNACION	POR CONTRATAR	CADA 3 MESES	FEBRER:19,20,21,22,23/2022 MAYO:21,22,23,24,25/2022 AGOT:20,21, 22,23,24/2022 NOV:12,13,14,15,16/2022	Verificación de funcionamiento, limpieza general a sus componentes , electrónicos, Validación y puesta en marcha.